



Unitaire
Plurale



Définitive



Scellée



Standard



Direct
Implant

GUIDE D'UTILISATION

Choix de la hauteur de Vis de Cicatrisation In-Kone®

Les particularités du système In-Kone® :

- le Platform Switching,
- une connexion unique quels que soient les diamètres,
- la liberté d'enfouissement de l'implant,

nous amènent à porter votre attention sur l'importance du choix de la vis de cicatrisation.

Recommandations :

Le choix de la vis de cicatrisation :

- Le choix de la hauteur de la vis de cicatrisation doit être réalisé en fonction de la hauteur gingivale et de l'enfouissement de l'implant (voir conseils dans le tableau ci-dessous).
- Pour cela, un large panel de vis de cicatrisation est mis à votre disposition (Vis Ø4 H 0.7-1.5-3-5-7 mm, Vis Ø5 H 0.7-1.5-3-5-7 mm, Vis Ø6 H 1.5-3 mm).

Le choix du faux-moignon :

- La vis de cicatrisation signe la forme d'un manchon gingival. Il est impératif que le faux-moignon s'y inscrive parfaitement.
- La hauteur du faux-moignon doit absolument être identique à la hauteur de vis choisie.

IMPORTANT

Il est primordial de transmettre votre choix de hauteur de vis de cicatrisation à votre prothésiste.

Position de l'implant	Type de gencive	Choix de la hauteur de vis de cicatrisation		Choix de la hauteur de faux-moignon	
Sous-crestale	Epaisse	H3		H3	
	Fine	H1.5		H1.5	
Juxta-crestale	Epaisse	H1.5		H1.5	
	Fine	H0.7		H0.7	